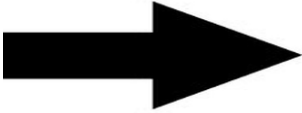


Problema

Causa Probable

Solucion

<p>Unidad no operando (suena la alarma de falla de alimentacion)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enchufe no firmemente en la pared 2. Tuvo un aumento de potencia 3. No hay energia en la salida de la pared 4. Corte de energia electrica 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise el enchufe en la salida 2. Verifique el boton de reinicio (en algunos modelos) 3. Verifique la Fuente de poder en la casa (fusible o disyuntor) 4. Use un cilindro de oxigeno de respaldo hasta que se restablezca la energia.
<p>Flujo limitado de oxigeno</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tubo defectuoso 2. Canula defectuoso 3. Humidificador suelto 4. Filtro externo bloqueado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retire la tuberia. Si se restablece el flujo adecuado, verifique si el tubo presenta dobleces u obstruccion. Reemplace si es necesario. 2. Retire la canula de la tuberia. Si se restablece el flujo adecuado, verifique que el tubo no este doblado o bloqueado. Reemplace si es necesario. 3. Verifique para asegurarse de que el vaso y la tapa esten bien apretados y que el humidificador este correctamente asegurado al concentrado. Reemplace si es necesario. 4. Limpie el filtro de aire. Si no se restablece el flujo, conecte la tuberia al cilindro de respaldo y llame a Flagship Medical, Inc.
<p>La luz de encendido esta apagada y la unidad esta funcionando</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bombilla Fundida 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No emergencia. Llame a la oficina durante el horario comercial normal.
<p>La luz amarilla esta encendida</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mala botella de humidificador 2. Tubo pinchado o retorcido 3. Entrada de aire bloqueada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el medidor de flujo. Si la bola negra rebota o se ha caido, quite el tubo para ver si la bola vuelve a la normalidad. Asegurese de que la entrada de aire este limpia.
<p>Todos los otros problemas</p>		<p>Llamada Flagship Medical, Inc. At (215) 992-7770 or toll free at (800) 344-6472</p>